

SAMARIT

safe patient moving & handling



SAMARIT "no lift" Umlagerungs-Systeme

Rollbord™ **HIGHTEC**

For
HEAVY
use!

Die sichere Methode zur Patientenumlagerung

Ganz gleich, ob sie in einigen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind oder in anderen Ländern ganz selbstverständlich zum Standard gehören – Arbeitsbedingungen müssen so optimal wie möglich sein. Krankenpflegepersonal sollte beim Umlagern niemals Patienten anheben müssen. **SAMARIT Produkte** ermöglichen ein müheloses Umlagern von Patienten und erleichtern so die Arbeit des Krankenpflegepersonals. Rückenverletzungen werden dadurch verhindert.

STANDARD

faltbar



*SWL: 240 kg
*SWL: 529 lbs

Für Radiologie, Operationssäle, Intensiv- und Spezialstationen, alle Stationen.

Abmessungen: 178 x 50 cm 2.7 kg
auf 89 x 50 cm faltbar

Bakterien- und pilzresistent, feuerfest, verstärkte Ränder, hautfreundliche Beschichtung, leicht zu reinigen.

Best.-Nr. 440.0100
UDI/GTIN: 7640144460013

ICU-BARIATRIC

nicht faltbar



*SWL: 310 kg
*SWL: 684 lbs

Für Intensivstation, und Bariatric.

Abmessungen: 178 x 50 cm 3.8 kg

Bakterien- und pilzresistent, feuerfest, verstärkte Ränder, hautfreundliche Beschichtung, leicht zu reinigen.

Best.-Nr. 440.0200
UDI/GTIN: 7640144460020

MINI-GYN

nicht faltbar



*SWL: 180 kg
*SWL: 397 lbs

Für Urologie und Gynäkologie, Notaufnahmestation.

Abmessungen: 91 x 50 cm 1.4 kg

Bakterien- und pilzresistent, feuerfest, verstärkte Ränder, hautfreundliche Beschichtung, leicht zu reinigen.

Best.-Nr. 440.0300
UDI/GTIN: 7640144460037

*SWL = Safe Weight Load

5 verschiedene Modelle für jede medizinische Anwendung

- für vielfachen starken Einsatz
- Röntgenstrahlendurchlässig
- nicht toxisch, antibakteriell ausgerüstet
- sicheres Umlagern der Patienten
- stressfrei für den Patienten
- rückschonend für das Krankenpflegepersonal
- hautfreundlich (kein Latex)
- leicht zu reinigen/desinfizieren – gewährleistet Hygiene
- Einweg-Schutzhüllen erhältlich
- reissfestes Nylongewebe
- überrollt Abstände bis 20 cm
- Ultraleicht, einfach aufhängbar

COVER DISPENSER
für alle Rollbord-Modelle



Wandmontage

Abmessungen: 15 x 66 x 14 cm

Best.-Nr. 440.1088
UDI/GTIN: 7640144460495

SURGIBOARD

nicht faltbar



*SWL: 180 kg
*SWL: 397 lbs

Für Operationssäle, Röntgenräume und alle Stationen (Ersatz für Aluminium-Roller).

Abmessungen: 120 x 40 cm 1.5 kg

Bakterien- und pilzresistent, feuerfest, verstärkte Ränder, hautfreundliche Beschichtung, leicht zu reinigen.

Best.-Nr. 440.0400
UDI/GTIN: 7640144460044

MRI/CT

faltbar




*SWL: 200 kg
*SWL: 440 lbs

Zum Umlagern verletzter Patienten von/auf Tragen.

Abmessungen: 178 x 40 cm 2.5 kg
auf 89 x 40 cm faltbar

Bakterien- und pilzresistent, feuerfest, verstärkte Ränder, hautfreundliche Beschichtung, leicht zu reinigen.

Best.-Nr. 440.0500
UDI/GTIN: 7640144460051

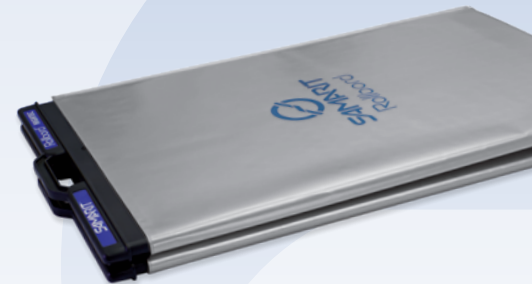

EINWEG-SCHUTZHÜLLE

für alle Rollbord-Modelle



Schützt Rollbords vor Blut und Verschmutzungen. **Abmessungen:**
200 cm, Ø 60 cm (50 pcs) 79 inch, Ø 24 inch
135 cm, Ø 60 cm (74 pcs) 53 inch, Ø 24 inch

200 cm Best.-Nr. 440.1000
UDI 7640144460471
135 cm Best.-Nr. 440.1400
UDI 7640144460488



SAMARIT „No Lift“ Umlagerungssysteme erleichtern die alltägliche Arbeit mit Patienten.

SAMARIT gibt darüber hinaus auch den Patienten das Gefühl von Komfort und Sicherheit.

In Krankenhäusern, wo Patienten mehrmals am Tag sicher umgelagert werden müssen, macht **SAMARIT** die Arbeit für das Pflegepersonal leichter und Patienten das Leben komfortabler.

SAMARIT Umlagerungssysteme – eine große Hilfe für medizinisches Fachpersonal auf der ganzen Welt!

Wenn Sie sich vorstellen, wieviele Male Patienten Tag für Tag in medizinischen Einrichtungen und anderen Institutionen umgelagert werden, lernen Sie den wahren Wert von **SAMARIT** Originalsystemen zu schätzen. In der Tat werden weltweit über 150.000 **SAMARIT** Umlagerungssysteme von Krankenpflegepersonal verwendet.

Alle finden, dass ihre Arbeit durch den Einsatz von **SAMARIT** Produkten erleichtert wird.

wiegt nur 3 kg und ist schnell und überall einsatzbereit





Den Patienten auf die Seite drehen, das Rollbord unter den Patienten schieben und den Patienten in die Ausgangslage zurückbringen.



Den Patienten vorsichtig ohne übermäßige Kraftaufwendung an Schulter und Hüfte schieben und umlagern.



Patienten auf die Seite drehen. Das Rollbord vom Fußende beginnend entfernen.

Umweltfreundliches Material*

SAMARIT Umlagerungssysteme werden aus ökologisch unbedenklichen Materialien hergestellt. Sie können auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden, und im Brandfall geben sie keine toxischen Dämpfe ab.

* Gleitoberfläche aus Teflon mit einem Kern aus Polyethylen-Schaumstoff, Polyester-schicht, PE-Sicherheits-Enden.

Leicht zu reinigen

Das Rollbord lässt sich am Besten mit *SamaClean Wipes* oder einem anderen medizinischen Desinfektionsmittel reinigen. Falls während eines Patiententransfers Verunreinigungen auftreten können, sollten Sie das Rollbord mit der Rollbord-Einweghülle schützen. Dieses bedeckt das Rollbord und fängt Verunreinigungen auf, sodass die eigentliche Rollbordoberfläche nicht

verunreinigt wird. Reparaturen dürfen nur von einer Fachkraft ausgeführt werden, da ansonsten die Garantie erlischt.

Hohe Qualitätsmaßstäbe

SAMARIT Umlagerungssysteme besitzen:

- das CE-Zeichen
- Design-Patente

EU-SRN: CH-MF-000016280
CHRN: CHRN-MF-20000184

www.samarit.com

Verlangen Sie auch die separaten Broschüren weiterer Produkte von SAMARIT!



SAMARIT Rollbord ECOLite



SAMARIT Rollbord H-Line



SAMARIT Transglide



SAMARIT Hilfsmittel

Laden Sie Produktbroschüren in Ihrer Sprache von unserer Website herunter oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

SAMARIT
safe patient moving & handling

Samarit Medical AG

Gewerbestrasse 12
CH-8132 Egg, Schweiz

Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39

e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com

